


爽快 お〇キレイぐるっとブラシ

高い歯垢除去力でキレイな歯を！

毛先が丸く歯茎にやさしい

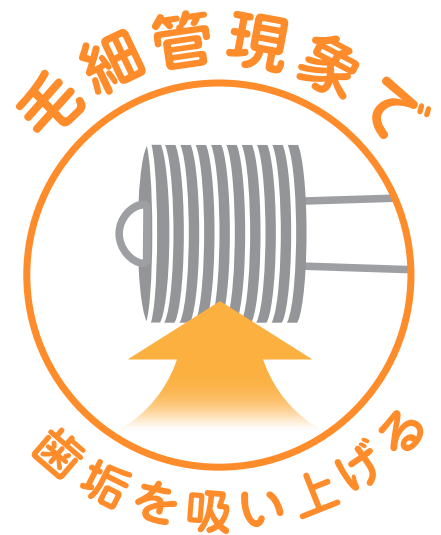


製品特長

標準的な歯ブラシのように、擦って取るのではなく、20倍以上の毛数による毛細管現象※で毛束の中に歯垢を吸着することができます。

※毛細管現象

細い管の間を液の表面張力の作用により、吸い上げる現象のことです。毛束が多いほど、より吸い上げます。

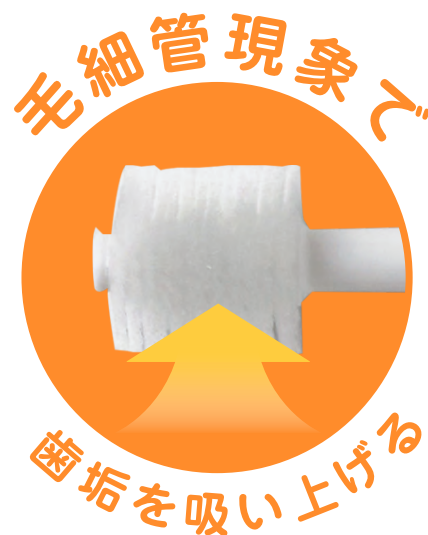

磨き方 回転させずに、ふつうの歯ブラシと同じように、縦磨き・横磨きで磨いてください。1本ずつ磨くイメージです。

前歯




ふつうの歯ブラシと同じように、横磨きか、縦磨きで磨きます。歯並びが良くない方には縦磨きをおすすめします。

前歯の裏側



毛先がきっちり当たりにくいのが前歯の裏側です。円筒ヘッドで大量の極細毛があるため、汚れている部分にぴったりフィットします。

犬歯

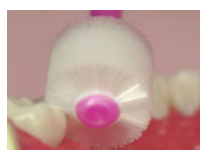

凹凸が多い犬歯の部分は、縦磨きで磨きます。裏側の傾斜部分も、一気に磨き上げることが可能です。

前歯裏側の上下同時磨き



円筒ヘッドなので、上下同時に磨くことも可能です。回転させずに横磨きで磨いてください。

奥歯



内側側面は、ハンドルを斜めに立てて、斜め方向に小刻みに動かして磨きます。

奥歯の上下同時磨き



軽く噛むようにしてトップを磨きます。奥は開き気味に、手前は閉じ気味といったように、あごの角度を徐々に変えていくのがポイントです。

歯茎ブラッシング



肌をパッティングするのと同様に、歯茎も軽くブラッシングをおすすめします。

舌クリーニング



軽く舌を突き出し、ブラシを舌にのせ、力を入れ過ぎないようにして手前に引き出します。

柄の材質	ポリプロピレン	毛の硬さ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	90℃

製品情報

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3162360	ブラシ直径15mm ホワイト	10本/箱	50箱	4 958286 718187

※ 詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社 <https://www.hakuzo.co.jp/>
〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号 TEL.06-6942-0451 FAX.06-6945-0539

本社営業課 TEL:06-6809-4318	三重営業所 TEL:059-350-3844	札幌駐在所 TEL:011-788-8009
東京支店 TEL:03-3522-6720	京都営業所 TEL:075-603-4826	北陸駐在所 TEL:076-225-8013
北大阪支店 TEL:072-653-4045	大阪中央営業所 TEL:06-6943-6118	高松駐在所 TEL:087-813-7416
南大阪支店 TEL:0721-20-2900	阪神営業所 TEL:078-262-1634	愛媛駐在所 TEL:0898-52-7656
仙台営業所 TEL:022-393-7434	神戸営業所 TEL:078-940-8975	鹿児島駐在所 TEL:099-296-1925
関東営業所 TEL:03-5809-4780	広島営業所 TEL:082-849-4188	沖縄駐在所 TEL:098-941-5320
西東京営業所 TEL:042-646-0451	福岡営業所 TEL:092-481-5921	
三河営業所 TEL:0564 54 5447	熊本営業所 TEL:096-345-2253	