

安心スロープフリーサイズ 使用上の注意点

本品のお買い上げ頂き有難う御座います 安全に御使用頂く為
下記の正しい使い方 及び注意事項を必ずお守りください


(1) 段差10Cm以内の場所に使用できます

注意 ☒ 10Cmを超える段差には使用できません


(2) 対荷重 120Kgをお守り下さい

注意 ☒ 自動車等重量車両には使用できません


(3) 正しいセットの仕方 その1

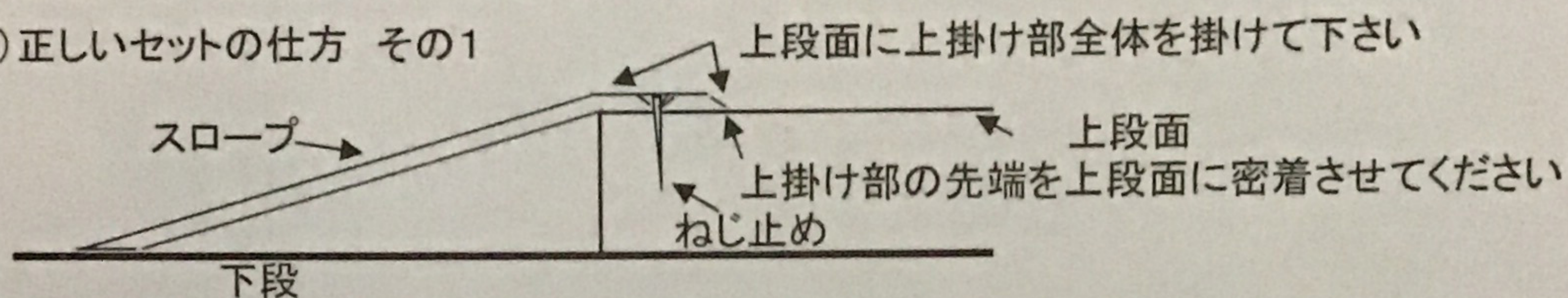


注意 ☒ 上掛け部全体が
掛っていない

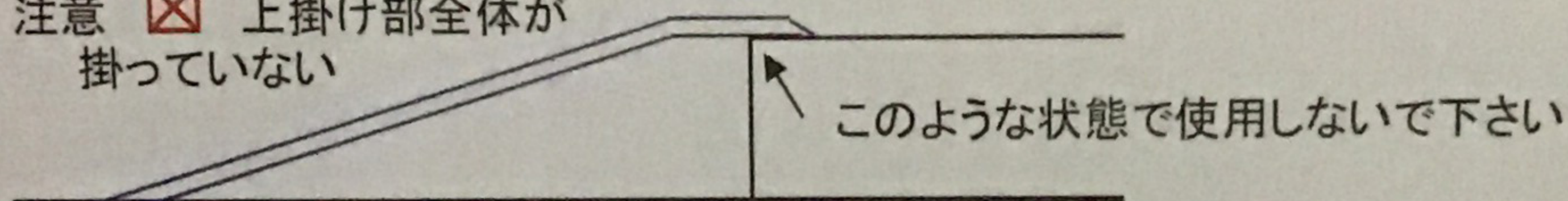


注意 ☒ 上掛け部の先端と上段面に
隙間がある

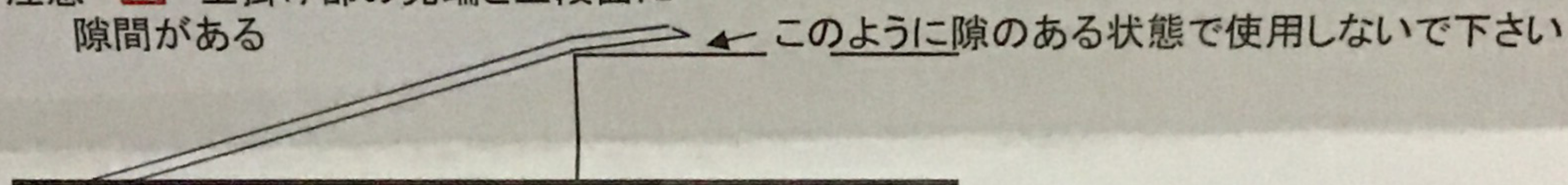

(4) 正しいセットの仕方 その2

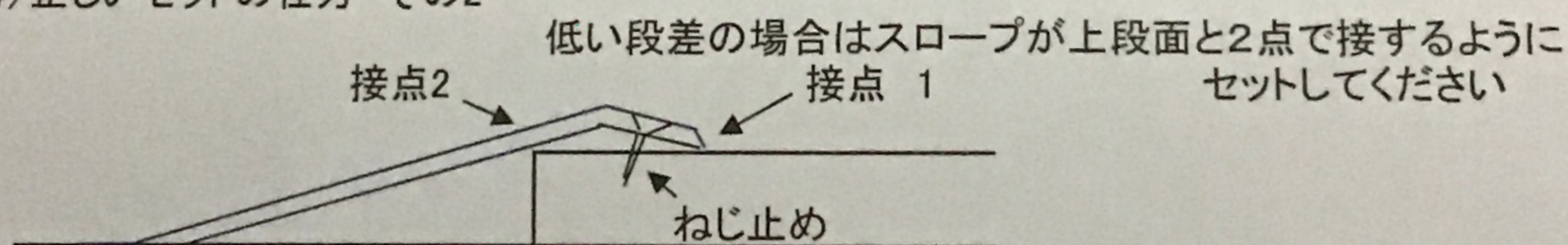

注意 ☒ スロープと上段面の接点が1箇所のみは避けてください

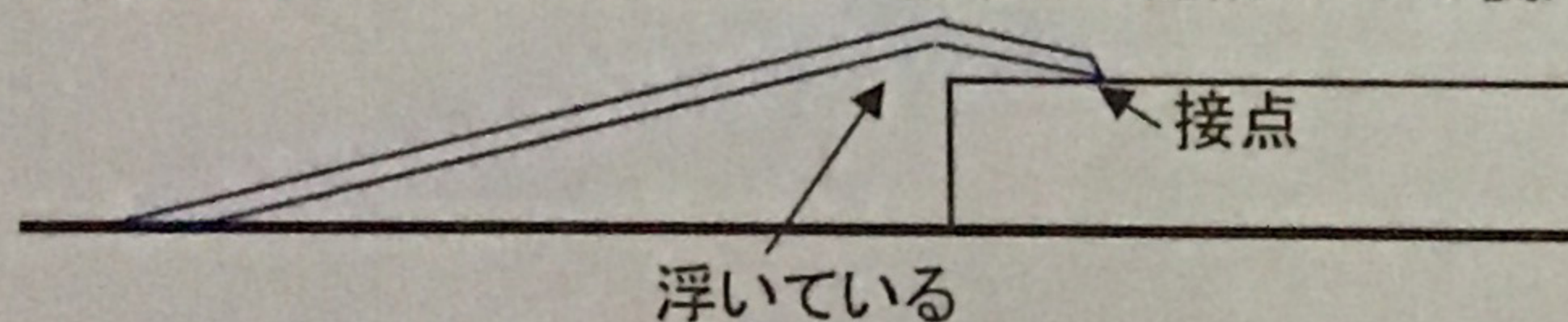

注意 ☒ の使い方及びセットの仕方は危険ですからしないで下さい

お勧め スロープと上段面はねじ止めをお勧めします
ねじ止め出来ない場合は正しいセットになっているか常に確かめてお使い下さい

お問い合わせは 株式会社 シクロケア
お客様 係
電話 072-956-0033