


寸法

単位：cm

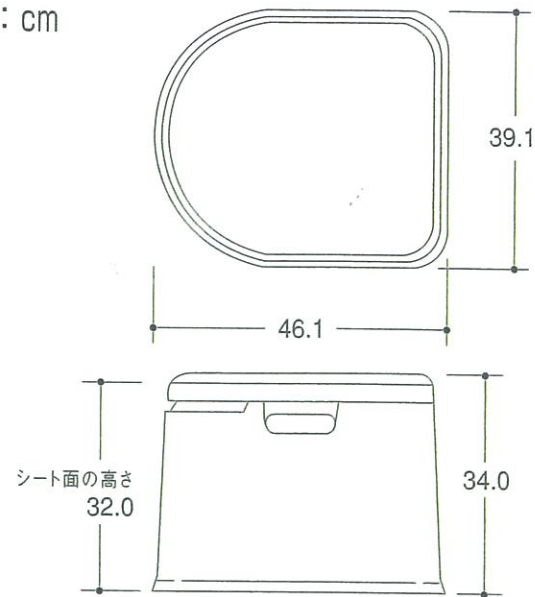

品質表示	
本体・便座 便蓋・ポット ポット蓋・取手	ポリプロピレン

重量：2.4kg 汚物受け容器の容量：満水容量 11L
実用容量 4~5L

自由に関するお問い合わせセンター
フリーダイヤル 0120-530743
(9:00~17:00 土日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/>

環境用品メーカー
山崎産業株式会社
営業本部 〒556-0001 大阪市浪速区下寺3-11-2

MADE IN JAPAN



安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

注意

- プラスチック製ポータブルトイレです。他の用途には使用しないでください。特に踏台や椅子として絶対に使用しないでください。
 - お子様や病人、老人がご使用になる場合は、安全のため介護人による介護など必要に応じて行ってください。
 - 蓋上面に座らないでください。
 - 使用時に蓋に寄りかからないでください。
 - お子様が本体の上ののって遊んだり、横ゆれさせたりしない様、注意してください。
 - お手入れのあとなど、野外で直射日光に長く放置すると、色あせや樹脂が劣化する事があります。
 - 乱暴な取扱いは避けてください。破損や事故の原因になります。
 - この製品の耐荷重は150kgです。体重150kg以内の人がご使用ください。
 - タワシ・みがき粉は使用しないでください。
 - 揮発性シンナー・ベンジン・クレゾール等は使用しないでください。
 - 市販のトイレ用クリーナーや洗剤をご使用になる時は、ご使用前にその洗剤の「注意書き」をよくお読みの上、正しくお使いください。洗剤の中には樹脂部品をいためたり、変色するものがありますので注意してください。
 - ストーブ等、火気の近くでは使用しないでください。
- 〈廃棄される場合〉
- 廃棄される場合は専門業者又は、公的機関にご相談ください。

CONDOR
CONDOR is a creative cleaning instrument with both Hi-sensitivity and Hi-quality. Whenever you use it, it makes you more happy and intergrade your life more fashionable!

安心、清潔、思いやりトイレ

ポータブルトイレ P型 普及タイプ

使用説明書

- このたびは、当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

特長

お部屋で安心、スツール感覚の清潔トイレ。

- 手軽に設置できる簡易トイレ。
- 丸みを生かしたシンプルで安心感あるデザインです。
- ポットは取手が付いて持ち運びに便利です。
- プラスチックの一体成型でお掃除簡単！
- ポットは汚物を捨てる時にこぼれにくい形状です。
- お年寄り、ご病人のほかこんなところにもご使用ください。
 - ・2階や離れ、子供部屋に…
 - ・キャンプ場・海水浴場に…
 - ・ヨットや釣舟に、田んぼや建築工事現場に…
 - ・妊産婦・高血圧・心臓病・痔病の方に…

使用方法

※ポットに水を2L入れてください。より防臭効果高めるために市販の消臭剤、防臭剤を入れてください。ご使用前にその消臭剤、防臭剤の「注意書き」をよくお読みください。

(男子大便、女子用)
便蓋と便座を上げ、ポットの蓋を取り、便座だけを下げて右図のように腰掛けて使用してください。



使用後の汚物処理は…

- 汚物はなるべく早目にお捨てください。
 - 汚物をお捨てになる時はポットだけを取り外して水洗トイレか既設トイレにお捨てください。
- ※便座・便蓋は上にもちあげれば取り外せますのでお手入れに便利です。



お手入れ方法

いつまでも気持ちよく清潔にお使いいただくために、時々、次のようなお手入れをしてください。
ポット内部は…汚物放流後、水かぬるま湯でゆすぎ、スポンジか布に中性洗剤をつけて、汚れをふきとってください。

- 便座と便蓋は時々からぶきしてください。

