



スマイルキッズ

AYD-105

自動でオン・オフ 受話器の拡声器

バンドで
簡単装着子機にも
対応

受話音量
最大約
30倍

07/24 13:50
タナカ タロウ
0612345678

留守 音量



単5形アルカリ乾電池2個使用(別売)

1日約30分使用で約1ヶ月間使用可能

〈国内メーカー製アルカリ乾電池使用時〉

自動でオン・オフ 受話器の拡声器

AYD-105




ご使用方法

- ① 電話の受話器のスピーカーの部分に、集音カップが当たるように固定バンドで取り付けます。
- ② 矢印(大)の向きにボリュームつまみを回してスイッチオンにすると、拡声器がスタンバイ状態になります。
- ③ その状態で受話器を取り上げる等、本体が振動を検知すると、赤いランプが点灯して動作状態に入ります。

電池の入れ方

- ① 本体裏面にある電池カバーを押し下げて外し、単5形乾電池をケース表示の⊕⊖の向きに従って⊖側から入れてください。
- ② 電池カバーを電池ケースの溝に沿って、パチッと音がするまではめ込んでください。
※音量が上がらなければ電池の交換時期です。2個とも新しい乾電池に交換してください。

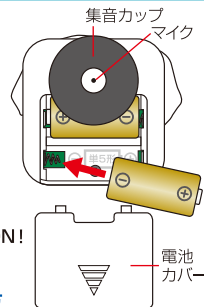

- ※受話器のスピーカーと集音カップの位置により、ハウリング(ピー音)が発生する場合があります。そのときは集音カップの位置を調整し、少しボリュームを下げてお使いください。
- ※約1分間、無音・無振動状態が続くと自動的にスタンバイ状態に入ります。このとき、受話器を取り上げる等、振動を検知すれば動作を再開します。
- ※受話機の形状により、受話器が電話機本体に取まらない場合があります。その場合は使用のつど脱着してください。
- ※コードレス電話の場合、わずかな雑音が入る場合があります。
- ※受話器が小さく取り付けが困難な場合は、受話器の背面にパッドを貼付してご使用ください。
- ※本品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- ※ご使用済みの電池は、リサイクルをお願いします。

安全上のご注意

次のことを守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂、本品の故障・破損などの原因になります。

- 音量は適度な大きさに調整してください。
- 湿気や火気のそばでのご使用は避けてください。
- 分解したり、用途以外の目的には使用しないでください。
- 電池は電池ボックスの⊕⊖表示に従い、⊖側から正しい向きに入れてください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、メーカーの異なる電池を混ぜてご使用しないでください。
- 保管する場合は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

材 質	本体/ABS樹脂、 固定バンド/ポリウレタン、 集音カップ/ゴム、パッド/EVA
サ イ ズ	約5×5×3cm(最大突起含まず)
重 量	約35g(電池・パッドを除く)
使用電池	単5形アルカリ乾電池×2個(別売)
付 属 品	パッド

電話機によっては本機の取り付け後、電話が切れなくなることがあります。



スマイルキッズ 旭電機化成株式会社

お問い合わせ先

〒537-0003 大阪市東区神路4丁目3番18号
TEL (06) 6978-1371
受付 9:00~17:00 (土日・祝祭日を除く)
2019.11 © SMILE KIDS MADE IN CHINA



台紙 プリスター:PET

AYD-105
自動でオン・オフ受話器の拡声器

4 962644 942800