

プロテクトガード DS2 レスピレーターマスク 折りたたみ式

ProtechGuard DS2 particle respirator Foldable

使い捨て式防じんマスク

指定防護係数

10

国家検定規格

米国NIOSH規格

DS2 と N95 ダブルで取得

Point 1

個包装で衛生的。
持ち運びにも便利。



Point 2

クッション性の高い
ノーズフォーム(鼻当て)で
漏れの軽減と快適性を実現。



Point 3

しめひもの長さが調整できる
シリコン製の**アジャスター**付き。
※アジャスターは上のしめひもに付属



Point 4

顔の形に合わせて調整ができる
プラスチック製ノーズクリップ。
金属素材不使用で分別不要。

Point 5

超音波接着のため
ステープラー (ホチキス) 不使用。
金属アレルギーの心配がなく
高い耐久性と安全性を実現。



標準価格 **160円 / 枚**

1ボックス(20枚) 3,200円
1ケース(12ボックス) 38,400円

おすすめの用途

医療・臨床検査



医療従事者の呼吸器感染症対策に

一般工場



溶接・研磨・切削など、粉じんの発生する作業に

規格・性能

【厚生労働省 国家検定規格 DS2合格品】

	型式名称	国家検定番号
67830	6001-DS2	第TM842号
67813	9600-DS2	第TM814号
67823	9600-DS2V	第TM815号

※D=Disposable(使いきり)、
S=Solid(固体、試験に固体粒子を使用)

【米国NIOSH規格 N95合格品】

	米国NIOSH検定番号
67830	TC-84A-9846

NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health)
N= Not resistant to oil (耐油性なし)、
95=試験粒子を95%以上捕集

【性能情報】

項目	6001-DS2	9600-DS2	9600-DS2V
粒子捕集効率	95.0%以上	95.0%以上	95.0%以上
吸気・排気抵抗値	50Pa以下	50Pa以下	70Pa以下
吸気抵抗上昇値	160Pa以下	160Pa以下	160Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	1.0%以下	1.0%以下
使用限度時間	14時間	14時間	17時間

- 試験粒子: NaCl(塩化ナトリウム)粒子0.06~0.10マイクロメートル※
- 試験濃度: 50ミリグラム/立方メートル以下(濃度変動±15%)
- 試験流量: 85リットル/分
人の呼吸量参考データ: 安静時…6~10リットル/分、荒い状態…30~40リットル/分

※主な微細粉体サイズ例(マイクロメートル)

スズ花粉	30.00~40.00	小麦粉	5.00~200.00
金属ヒューム	0.10~10.00	インフルエンザウイルス	0.10
結核菌	0.30~0.60×2.00~10.00		

装着方法



①

図のように鼻当てを前に向け、しめひもが下に向くように持ちます。



②

マスクでアゴを包むように当てます。



③

片手でマスクをおさえながら下のしめひもを首のまわりにつけ、次に上のしめひもを頭上後頭部につけます。



④

アジャスターを持ち、しめひもを引っ張り、長さを調整する。上下のしめひもの引っ張り具合を調整します。



⑤

両手の指で鼻当てが鼻に密着するように軽く押します。



⑥

両手でマスク全体をおおい、息を吐き空気の漏れをチェックして最も密着する場所にマスクを合わせます。
(ユーザー・シールチェック)

製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード GTINコード	製品情報
	プロテックガード DS2 レスピレーターマスク 折りたたみ式	67830	4901750678302	20枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 N95規格 RoHS指令規格 14時間 使用限度
			14901750678309	

関連製品

製品画像	製品名	製品番号	JANコード GTINコード	製品情報
	プロテックガード DS2 レスピレーターマスク	67813	4901750678135	20枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 RoHS指令規格 14時間 使用限度
			14901750678132	
	プロテックガード DS2 レスピレーターマスク バルブ付き	67823	4901750678234	10枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 RoHS指令規格 17時間 使用限度
			14901750678231	

製品の仕様やパッケージ等は変更する場合がありますのでご了承ください

日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6

ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>



北海道営業支社 011-281-3881
 東北営業支社 022-264-2461
 首都圏産業・業務用品営業部 03-6665-5327
 首都圏メディカルケア営業部 03-6665-5318
 中部PF営業支社 052-220-5206
 関西PF営業支社 06-6389-2047
 中四国営業支社 082-545-6600
 九州営業支社 092-725-8282

販売店