

○特 長

- 厚生労働省のマスク用規格DS2に合格した、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。
規格DS2
Disposable（使い捨て用途）
Sodium Chloride（塩化ナトリウム微粒子による試験をクリア）
2（3段階に分かれた中位の性能）
を意味しています。
直径0.06～0.1マイクロメートルの塩化ナトリウム微粒子を95%以上捕集できるという、
NIOSH規格のN95を上回るものです。
法人装置の必要な産業用途のほか、結核など院内感染の防止用途などには十分な
性能を発揮します。
- 一体成型加工のノーズブリッジにより、メタルノーズバンドなしで、簡単かつ快適にフィット。
- 高温高湿条件下においても型崩れに耐えるようになっています。
- 顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧を軽減
- 総コストを抑え、優れた快適性、耐久性と順応性を実現。
- 日本人仕様

マスク外観の清潔感を保ちます。

熱や湿気による型崩れを防ぎます。

フィルターは両面から保護されていま

裏張りが顔とマスクの接点を快適に維持します。



マスク内側



○参考サイズ (単位:mm)

幅(外寸)	130
幅(内寸)	115
長さ	135
長さ(内寸)	115
バンド	6 X 670 X 1

○使用対象

油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

○使用できないもの

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)の
PEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。

●取付け方法

1. ストラップの先端を首の後で止めてください。
2. 鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。
3. 輪状のストラップを後頭部にかけてください。
4. 使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば
正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。
5. 使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら下げることができます。

