



3M™ VFlex™ 防じんマスク/防護マスク 装着方法

STEP 1 マスクの損傷確認!



マスクに損傷がないことを確認します。損傷がある場合には、新しいマスクをご使用ください。


STEP 2 マスクをカップ型に



ノーズクリップを内側から外側に向けて山折に曲げます。

マスクの上面と下面を持ち、上下に広げカップ型にします。しめひもがマスクの上面にくるようにしてください。

STEP 3 マスクを装着する



マスクを顔に当てます。マスクがアゴを包み込むようにイメージしてください。

マスクを片手で押さえたまま、1本目(2本の内どちらでもかまいません)のしめひもを頭頂部にまわします。

2本目のしめひもを頭頂部にまわします。

STEP 4 マスクを調整する



マスクが鼻の付け根からのど元まで広がるように調整してください。

2本のしめひものネジレを修正します。両手の人差し指で、しめひもを引っ掛けるようにしてのばすとネジレが修正されます。

マスク本体の左右のタブを両手で持ち、タブが顔に対して水平になるようにマスクの位置を調整します。

STEP 5 ノーズクリップを押し付けて!



ノーズクリップを鼻の形に沿って両手の指で押し付け、顔に密着させます。

これで完了です。

STEP 6 ユーザーシールチェック!



マスク全体を手で覆い、息を強く吐き出します。(陽圧式)この時、マスクの縁から息が漏れなければ、正しく装着されています。次に息を素早く吸い込みます。(陰圧式)この時、マスクの縁から空気が入り込まなければ、正しく装着されています。

3M、VFlexは、3M社の商標です。

スリーエムヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部
OHS-462-A

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

