

長時間の装着でも疲れない

FACE SHIELD

Titanium

不特定多数の人と接する仕事の感染対策に！

- 素材から製造まで、すべてが安心の日本製
- 考え抜かれた高度な設計により、長時間の装着でも疲れない
- 軽くて強いチタン製ホルダーを採用、アルコール消毒や紫外線殺菌も可能

① チタンとは 医療現場でも採用される安心の金属／軽い、強い、しなやか(弾性)／汗や整髪料による変色、腐食のない金属／アレルギーを起こしづらく肌に優しい




装着イメージ




通常の場合 ヘアゴムをつけた場合

シールド取付方法

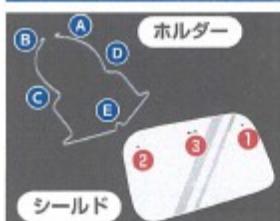

シールド、及びホルダーに向
きはありません。(左右対称)

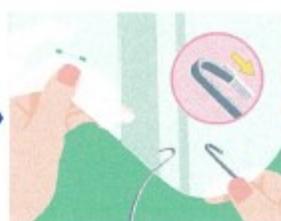

シールドの①にホルダーの
Aを差し込みます。




同様にシールドの②にホル
ダーのBを差し込み、それぞ
れホルダーのC、Dあたりま
で通します。



シールドの中央をホルダーに
沿うように押し込み、シール
ドの③にホルダーのEを押し
込んで固定してください。

ホルダー調整方法

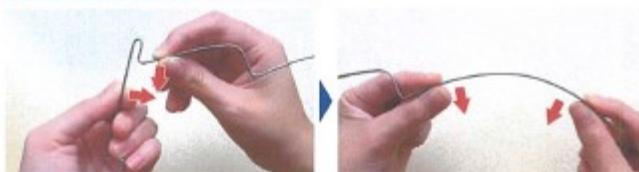

- ホルダーがずれ落ちる等ゆるいと感じる場合は、矢印の方向に曲げ、ご自身の頭部にフィットするように調整してください。
- きついと感じる場合は、矢印と反対の方向に曲げて調整してください。

フェイス シールド チタニウム

■製品仕様

<ホルダー> 材質：チタン 重量：約12g
<シールド> 材質：PETシート0.2mm厚 重量：約14g

■内容物

ホルダー1個、シールド3枚

●ホルダーやシールドの端で手を切らないようにご注意ください。●装着時に、ホルダーの先端が目に入らないようにご注意ください。●子供の手の届く場所や、誤って踏んでしまう場所に置かないでください。●車内等の高温になる場所に長時間放置しないでください。●製品仕様は予告なく変更することがあります。

■製造元 アルケーウィル株式会社

〒604-0647 京都府中京区島丸通二条下ル秋野々町528番地 ヒロセビル8階

☎075-634-4511