

日本製

らせん式  
ゴムの耳かき  
(ブラシ付き)

# ミミスキットスリム

らせん式耳かき

やわらかブラシ



ブラシ幅 約6.3mm

- ① 耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でこそぎ落とします。
- ② 仕上げはやわらかブラシ。小さめなブラシが女性の耳孔にも入りやすい。

※耳孔(外耳道)の中でのみ使用してください。  
※耳の中で強く押し付けて曲げたり、ねじらないでください。

- 耳かきは丸洗いOK。流水で流すだけで汚れが落ちます。軽く水を切り自然乾燥させてください。

## △ ブラシ部のお取り扱い注意

耳かき中やブラシ部の汚れを取る際、水で洗う際などは、

**強く押し付ける・ねじる・曲げる・  
繰り返す曲げ伸ばす・引っ張る**  
行為は絶対にお止めください。

**※変形してチギれます。**

- ▶ ご使用前には、指で触ってブラシ部分がチギレかかっているかを必ず確認してください。

チギレがあった状態では、絶対に使用しないでください。そのままご使用になるとチギレて耳の中に残る恐れがあり大変危険です。

G-2190 らせん式ゴムの耳かき(ピンク)



4 972525 534864

△ 注意：ご使用になる前に下記の注意をよくお読みください。

- ① 耳かきのしすぎは危険です。毎日せず、適度に間隔を空けて行うよう心がけてください。
- ② 無理に奥まで入れないでください。耳孔の内側や鼓膜が傷つく原因となります。
- ③ 周囲の環境に気を付け(周りに人がいないことを確かめた上)ご使用ください。
- ④ 水泳やお風呂後といった耳の中が濡れているときはご使用にならないでください。  
また、耳の病気の時はご使用にならないでください。
- ⑤ お子様だけでのご使用は危険ですので、絶対におやめください。また保管場所にもご注意ください。