

日本製

ミミスキット

らせん式ゴムの耳かき ツウウェイタイプ

二重らせん耳かき

らせん式耳かき



- ① らせんが二重になったことで耳孔の内壁に直接当たる面積が倍増。力が分散するので、当たりはマイルドに。
- ② 耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢をらせん構造の耳かきとゴムの摩擦でこそぎ落とします。

※耳孔(外耳道)の中でのみ使用してください。
※耳の中で強く押し付けて曲げたり、ねじらないでください。

- 耳かきは丸洗いOK。流水で流すだけで汚れが落ちます。軽く水を切り自然乾燥させてください。

⚠ お取り扱い注意

耳かき中や耳かきの汚れを取る際、水で洗う際などは、

**強く押し付ける・ねじる・曲げる・
繰り返し曲げ伸ばす・引っ張る**
行為は絶対にお止めください。

※変形してチギれます。

- ▶ ご使用前には、指で触ってチギレかかっていないかを必ず確認してください。

チギレかかった状態では、絶対に使用しないでください。そのままご使用になるとチギレて耳の中に残る恐れがあり大変危険です。

G-2194 らせん式ゴムの耳かき(ツウウェイ)



4 972525 534925

⚠ 注意：ご使用になる前に下記の注意をよくお読みください。

- ① 耳かきのしすぎは危険です。毎日せず、適度に間隔を空けて行うよう心がけてください。
- ② 無理に奥まで入れないでください。耳孔の内側や鼓膜が傷つく原因となります。
- ③ 周囲の環境に気を付け(周りに人がいないことを確かめた上)ご使用ください。
- ④ 水泳やお風呂後といった耳の中が濡れているときはご使用にならないでください。
また、耳の病気の時はご使用にならないでください。
- ⑤ お子様だけでのご使用は危険ですので、絶対におやめください。また保管場所にもご注意ください。