


## EA926AA-1、-2 バックサポート

品番	サイズ	重量
EA926AA-1	S(83cm)	360g
EA926AA-2	M(98.3cm)	400g

- ボディベルト
- バックサポート部 幅 200mm
- メディカルスタイルの伸縮性バック
- 非伸縮性コートスチール入り  
サイドパネルでまくれ上がりを軽減
- サスペンダーは調整可能



### <装着方法>

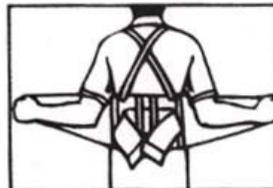


1.

- ① サスペンダーに腕を通し、テンションストラップを外します。  
ベルトの中心を背中にあわせ図のように横を持って引張ります。



2.

- ② ベルトを伸ばしながら左側に右側を重ねます。

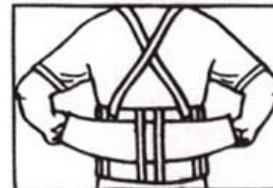

3.

- ③④ 後ろからテンションストラップを引張りながらマジックテープでサイドに貼り付けます。



4.



5.

- ⑤ サスペンダーの調整はスライドバックルを上下させます。